

Guia de uso básico do Sistema de Terapia ActiV.A.C.®



- A. Botão Liga/Desliga
 B. Interface de usuário da tela sensível ao toque
 C. Conexão do cabo de corrente elétrica
 D. Reservatório ActiV.A.C.®
 E. Curativo V.A.C.® WhiteFoam
 F. Curativo V.A.C.® GranuFoam™
 G. Película adesiva V.A.C.®
 H. Coletor SensaT.R.A.C.™

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM ALARMES*

Os alarmes detectam condições que exigem atenção do imediato do usuário. Eles serão acompanhados de um toque sonoro repetido.

Pressione para obter mais informações sobre como solucionar Alarmes.

Pressione para silenciar o toque por dois minutos.

Se a condição do alarme não for solucionada, entre em contato com seu representante local da KCI. Consulte o médico responsável sobre o uso de curativos alternativos caso a terapia fique desligada por 2 horas ou mais.

Tipo	Condição	Solução/Dicas para o usuário
RESERVATÓRIO CHEIO, ALARME DE TERAPIA INTERROMPIDA	A unidade detecta que o reservatório está cheio e deve ser substituído.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique o nível de fluido no reservatório. 2. Se o reservatório não estiver cheio, pressione Cancelar. 3. Se o reservatório estiver cheio, troque-o e pressione Reiniciar. 4. Reinicie a terapia, pressionando o botão Ligar/Desligar. <p>Dica: Mantenha a unidade na posição vertical com o reservatório apontando para baixo. Consulte a seção Posições/orientação.</p>
ALARME DE VAZAMENTO	A unidade detecta um vazamento com pressão negativa significativa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certifique-se de que o conector entre o curativo e a tubulação do reservatório esteja corretamente travado. 2. Verifique se o reservatório está totalmente encaixado. 3. Pressione o botão Seal Check™ e aplique uma leve pressão ao redor do curativo para ajudar na identificação de vazamentos. 4. Use a película adesiva excedente para vedar a área do vazamento. 5. Verifique se a Terapia V.A.C.® está ligada, observando se o curativo retrai. <p>Dica: Para lesões maiores, altamente exsudativas, ajuste o nível de intensidade para Alta.</p>
ALARME DE BLOQUEIO, TERAPIA INTERROMPIDA	A unidade determinou que existe um bloqueio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se as presilhas do curativo e da tubulação do reservatório estão abertas. 2. Verifique se a tubulação não está dobrada, comprimida ou bloqueada de alguma forma. 3. Verifique o curativo para certificar que há o corte de um orifício de 2,5 cm. 4. Se o alarme de bloqueio continuar, o fato de abaixar a unidade e a tubulação para que fiquem no mesmo nível ou abaixo do local da lesão pode solucionar esse alarme. 5. Pressione Reiniciar na tela para retornar à tela Inicial. <p>Dica: Verifique se o Coletor SensaT.R.A.C.™ está posicionado em uma área plana do corpo a fim de evitar dobras cutâneas.</p> <p>Dica: Evite o uso de fitas adesivas sobre o cotovelo do Coletor SensaT.R.A.C.™.</p>
ALARME DE BAIXA PRESSÃO, TERAPIA INTERROMPIDA	A unidade não atingiu a configuração de terapia selecionada, e a pressão negativa na lesão está abaixo do valor terapêutico.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se as presilhas do curativo e da tubulação do reservatório estão abertas. 2. Verifique se a tubulação não está dobrada, comprimida ou bloqueada de alguma forma. 3. Verifique se há o corte de um orifício de 2,5 cm no curativo. 4. Se o alarme de pressão baixa continuar, o fato de abaixar a unidade e a tubulação para que fiquem no mesmo nível ou abaixo do local da lesão pode solucionar esse alarme. 5. Pressione Reiniciar na tela para retornar à tela Inicial.
ALARME DE BATERIA MUITO FRACA	Alarme indicando que restam 30 minutos de energia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recarregue a bateria imediatamente. 2. Certifique-se de que o cabo de corrente elétrica esteja conectado firmemente à unidade de terapia. <p>Dica: Carregue a unidade de terapia pelo menos duas vezes ao dia.</p> <p>Dica: Solucione os alarmes de vazamentos no curativo o mais rápido possível a fim de evitar a exaustão da bateria da unidade.</p>

*A tabela não inclui todos os Alertas e Alarmes. Consulte o Manual do Usuário da ActiV.A.C.® para obter mais informações sobre Alertas ou Alarmes específicos.

DETECTOR DE VAZAMENTO SEAL CHECK™

Ajuda a localizar e solucionar vazamentos

- Fornece informação instantânea para ajudar a identificar vazamentos
- Economiza tempo tentando localizar e solucionar vazamentos
- Ajuda a garantir vedações precisas



RELATÓRIO DE HISTÓRICO DA TERAPIA


Informações em tempo real

- Permite que usuários monitorem e rastreiem a utilização da Terapia V.A.C.®
- Facilita baixar informações a um computador
- Ajuda a documentar o histórico do paciente



Aplicação do curativo

1. Corte a esponja V.A.C.® para que se ajuste ao tamanho e ao formato da lesão. Não coloque a esponja sobre tecido intacto. Não corte a esponja diretamente sobre a lesão. Faça uma observação no registro do paciente e na película adesiva sobre o número de esponjas utilizadas na lesão. É possível registrar a hora e a data de troca do curativo, bem como o número de esponjas, usando a ferramenta Registro de Item, acessível pela tela Início da terapia.
2. Apare a película adesiva para cobrir a esponja, deixando uma borda de 3 a 5 cm da pele intacta.
3. Pince a película adesiva e corte um orifício de 2,5 cm. Aplique a abertura do Coletor SensaT.R.A.C.™ diretamente sobre o orifício na película adesiva. Recorte um orifício, e não uma fenda, já que esta pode autovedar-se durante a terapia.

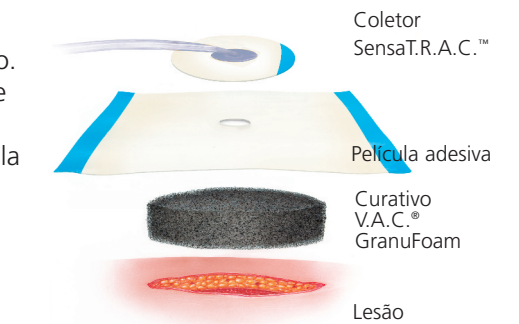

Instalação/remoção do reservatório

1. **INSTALE** o reservatório, deslizando a abertura do reservatório sobre a coluna do reservatório ou a guia de engate do reservatório. O som de um "clique" indicará que o reservatório foi instalado corretamente. (Fig. 1)
2. Conecte a tubulação do curativo à tubulação do reservatório, pressionando os conectores das tubulações e girando no sentido horário.
3. Abra as presilhas dos dois lados da tubulação antes de ligar a terapia.
4. Para **REMOVER** o reservatório, interrompa a unidade de Terapia V.A.C.®, pressionando o botão Ligar/Desligar na tela sensível ao toque. Não desligue a unidade de Terapia ActiV.A.C.®.
5. Feche as presilhas dos dois lados da tubulação.
6. Desconecte a tubulação do curativo da tubulação do reservatório, girando os conectores das tubulações em sentido anti-horário.
7. Pressione a liberação do engate do reservatório e remova o engate. (Fig. 2)



Início da terapia

1. Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado por aproximadamente dois segundos para ligar a Unidade de Terapia ActiV.A.C.®.
2. Pressione para iniciar ou interromper a terapia. O padrão de configuração é: 125 mmHg, terapia Contínua e intensidade Baixa.
3. Após o início da terapia, a tela Início da terapia será exibida, permitindo acessar o recurso Seal Check™ e a ferramenta Registro de Item.




Telas dos modos Clínico/Paciente

A Unidade de Terapia ActiV.A.C.® será fornecida ao novo paciente já configurada para o modo Clínico. No entanto, após 15 minutos de inatividade, a unidade de terapia passará para o modo Paciente.

Para acessar o modo Paciente:

1. Pressione o ícone para acessar a tela de ajuda.
2. Selecione Modo Paciente.

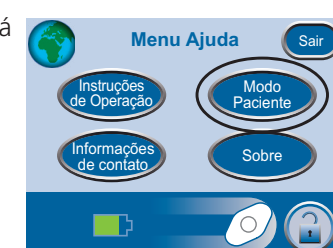

Pressione 'Modo Paciente' para prosseguir para esse modo.

Para acessar o modo Clínico:



1. Pressione o ícone para acessar a tela de ajuda.
2. Selecione Modo Clínico.
3. Mantenha OK pressionado por pelo menos 5 segundos para prosseguir para o Modo Clínico.



Pressione 'Modo Clínico' para prosseguir para esse modo.

Configurações da terapia

1. No modo clínico, pressione Terapia e, depois, Avançar para acessar a tela Terapia.
2. Selecione Configurações na tela Terapia para acessar as configurações de Pressão, Intensidade e Terapia Contínua/Intermitente.
3. Para ajustar a Pressão, use as teclas de seta para configurar de 25 mmHg a 200 mmHg em incrementos de 25 mmHg.
4. Para a terapia Intermitente, use as teclas de seta para aumentar ou diminuir as configurações de ativação e desativação entre 1 e 10 minutos (o padrão é 5 e 2).
5. Pressione OK para confirmar as configurações e iniciar a terapia.

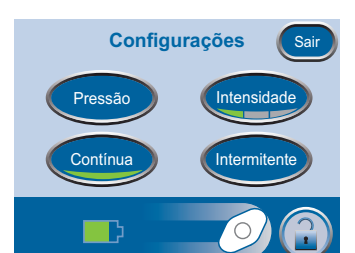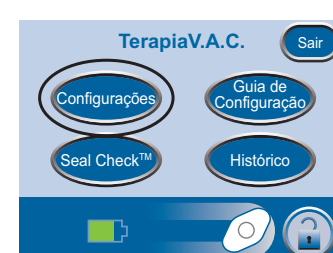

Pressione o botão do protetor de tela na tela inicial do ActiV.A.C.® para evitar alterações acidentais nas configurações prescritas.

Posições/orientação ideais

Recomenda-se que a unidade de Terapia ActiV.A.C.® seja mantida na posição vertical. A interface de usuário da tela sensível ao toque deve estar posicionada de forma que facilite a leitura, com o lado direito voltado para cima, ou posicionada com a parte frontal voltada para cima quando a unidade estiver em uma superfície plana.



Esta referência rápida é fornecida como uma visão geral básica. Consulte o Manual do Usuário da Unidade de Terapia ActiV.A.C.® para obter instruções completas e detalhadas. Em caso de emergências médicas, consulte o médico responsável ou ligue para o serviço de emergência. Leia e siga cuidadosamente as Diretrizes clínicas da Terapia V.A.C.® da KCI, todo o material impresso que acompanha o produto e suas etiquetas. Entre em contato com a KCI caso tenha dúvidas relacionadas ao produto antes de iniciar a terapia.



IMPORTANTE: assim como para qualquer dispositivo de prescrição médica, deixar de consultar um médico e de ler e seguir atentamente, antes de cada uso, todas as instruções da unidade de terapia e dos curativos, bem como as informações de segurança, pode levar a um desempenho inadequado do produto e a riscos de ferimentos graves ou fatais. Não ajuste as configurações da unidade de terapia ou execute a aplicação de terapia sem instruções e/ou supervisão de um profissional de saúde. Instruções detalhadas e informações de segurança são fornecidas com a unidade de terapia e nas caixas dos curativos.

©2010 KCI Licensing, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais aqui designadas pertencem à KCI Licensing, Inc., às suas afiliadas e às suas licenciadoras. Somente por prescrição médica DSL#11-0694.BR (Rev. 10/11)

